

Ohje...

Nielunäytteenottoon vanupuikolla*



QUICKVUE

POTILAAN VALMISTELEMINEN

- Ota näyte hyvin valaistussa paikassa.
- Seiso suoraan potilaan edessä.
- Aseta potilas miellyttävään istuma-asentoon kasvot valonlähdettä kohti.
- Varo koskettamasta vanupuikolla muuta aluetta kuin tonsilloita.


POISTA VANUUIKKO SUOJAPAKKAUKSESTA

Ota steriili vanupuikko suojapakkauksesta. Pidä puikkoa tukevasti kädessäsi. ÄLÄ LASKE puikkoa pöydälle suojapakkauksesta poistamisen jälkeen.

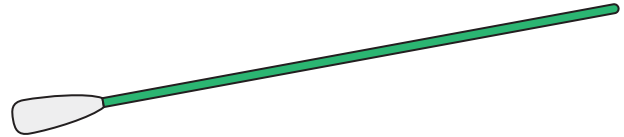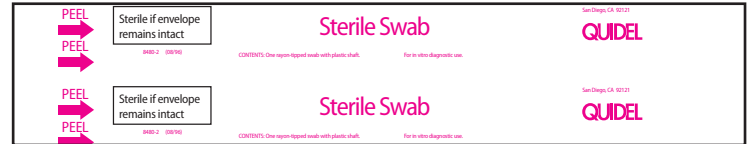

POTILASOHJEET

- Pyydä potilasta avaamaan suunsa mahdollisimman auki.
- Pyydä potilasta sanomaan "ahh." Tonsilloiden alueella voi näkyä punoitusta, turvotusta tai valkoisia peitteitä.

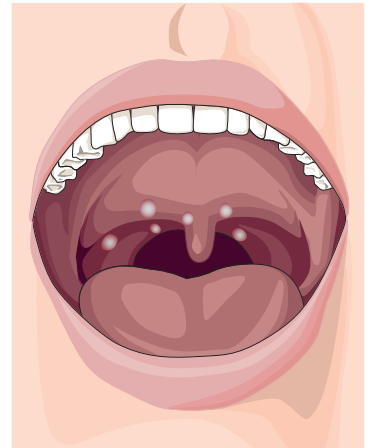

Katso seraavalta sivulta: Ohje Nielunäytteenottoon



Ohje...

Nielunäytteenottoon vanupuikolla (jatkuu)

NIELUNÄYTTEENOTTO

- Kohdistava vanupuikon kärki suoraan tonsilla-alueelle.
- ÄLÄ KOSKETA puikolla mitään muuta suun aluetta, äläkä kieltä.

Ota nielunäytteet vanupuikolla käyttäen vakioituja näytteenotto-ohjeita. Paina kieltä lastalla. Varo koskettamasta puikolla kieltä, poskia tai suun yläosaa. Kieritä puikkoa kurkun takaosassa, tonsilloissa ja alueella, jossa havaitset punoitusta, tulehdusta tai märkäisiä kohtia.

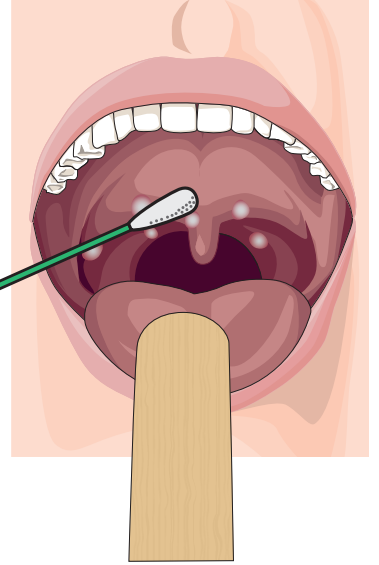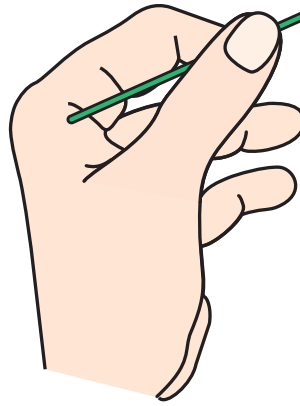

NÄYTTEENOTTO

- Kohdistava vanupuikon kärki tonsilla-alueelle.
- Kieritä puikon kärkeä nopeasti ja tukevasti tonsilla-alueella saadaksesi edustavan näytteen.
- Poista puikko suusta (koskettamatta muuta suun aluetta).
- Yökkäys-refleksi on yleinen merkki hyvästä näytteenotosta.
- On suositeltavaa tutkia vanupuikkonäyte mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen.

